

Incereb Neon Kit

- Optimizado para la UCIN
- Facilita la aplicación temprana de la monitorización cerebral con EEG.
- EEG y aEEG no invasivos, sin necesidad de agujas.

Ya no viene pre-engrasado

Las matrices de electrodos del Incereb Neon Kit ya no vienen pre-engrasadas, lo que permite a los médicos utilizar los geles y pastas de su preferencia en la cantidad que deseen.

Además, esta nueva versión ofrece una vida útil más prolongada, es más fácil de enviar, ocupa menos espacio de almacenamiento y tiene una mayor duración en comparación con la versión pre-engrasada.

Las matrices de electrodos Incereb Neon, aprobadas por la FDA, están diseñadas para optimizar el proceso de EEG neonatal, permitiendo que enfermeras de la UCIN o cualquier profesional capacitado puedan aplicar el dispositivo de manera rápida y sencilla en minutos. Esto garantiza que cada recién nacido que requiera un electroencefalograma tenga acceso a uno en cualquier momento (24/7/365), incluso cuando no haya un técnico en EEG disponible.



Los Kits de Matriz de Electrodos Incereb Neon están disponibles en dos tamaños: Neon 12, para la detección de convulsiones y Neon 8, para CFM (monitorización de función cerebral). Estos kits no contienen gel ni pasta, lo que los hace fáciles de enviar y almacenar, además de contar con una vida útil significativamente más larga que las versiones pre-engrasadas.

La matriz de electrodos Incereb Neon para bebés garantiza una colocación precisa y simétrica de los electrodos, permitiendo la comparación de datos entre hemisferios. Esto la hace ideal para su uso en la UCIN fuera del horario habitual, en ensayos clínicos neonatales y en EEG rutinarios en hospitales satélite.



Fácil de usar

Los kits de matriz de electrodos Incereb Neon aseguran una correcta colocación de los electrodos en la cabeza de neonatos o bebés.



Eficiente

Las matrices Incereb Neon pueden colocarse rápida y precisamente, reduciendo el tiempo que el neonato pasa fuera de la incubadora. No es necesario que la aplicación sea realizada por un equipo especializado en neurología o EEG.



Seguro

Los neonatos experimentan mínimo o ningún malestar y la matriz es bien tolerada en pieles delicadas, evitando infecciones asociadas a lesiones cutáneas.



Beneficios del Kit de Electrodo Incereb Neon

- Fácil de aprender a usar.
- Aplicación y retiro rápidos, reduciendo el estrés del bebé.
- Simetría precisa para comparación de datos entre hemisferios.
- Mínimo malestar para el bebé.
- Diseño atractivo y menos intimidante para los padres.
- Compatible con todas las principales marcas de EEG, CFM y sistemas de EEG de amplitud integrada.
- Fácil de enviar y almacenar.
- Mayor vida útil que las versiones pre-ensadas.

Especificaciones

Incereb Neon 8 Kit

- Seis electrodos de registro (F3, F4, C3, C4, P3, P4).
- Referencia y tierra en Cz.
- Para neonatos con >32 semanas de edad gestacional.
- De un solo uso.
- Se conecta a un cable amplificador reutilizable.
- Conectividad universal (conectores TP de 1,5 mm y tipo D).
- Certificación 510k K151576 y marcado CE según la normativa MDR.
- Dimensiones: 97mm x 208mm x 6mm.

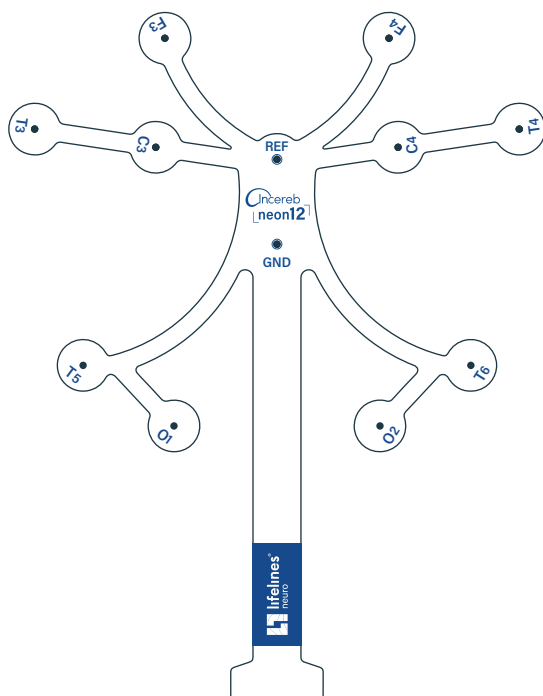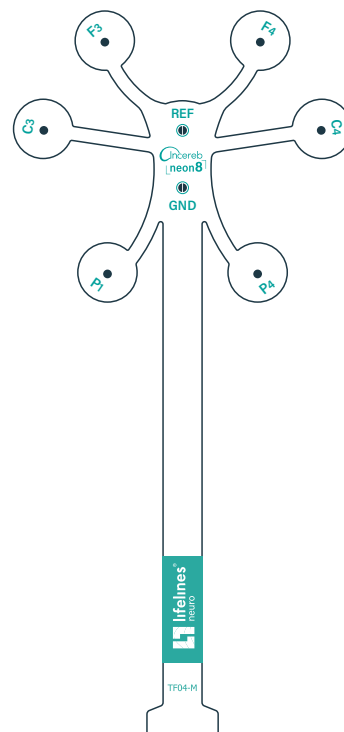

Incereb Neon 12 Kit

- Diez electrodos de registro (F3, F4, C3, C4, T3, T4, T5, T6, O1, O2).
- Referencia y tierra en Cz.
- Para neonatos con >32 semanas de edad gestacional.
- De un solo uso.
- Se conecta a un cable amplificador reutilizable.
- Conectividad universal (conectores TP de 1,5 mm y tipo D).
- Certificación 510k K151576 y marcado CE según la normativa MDR.
- Dimensiones: 178mm x 240mm x 9mm.