



# Colocación de electrodos

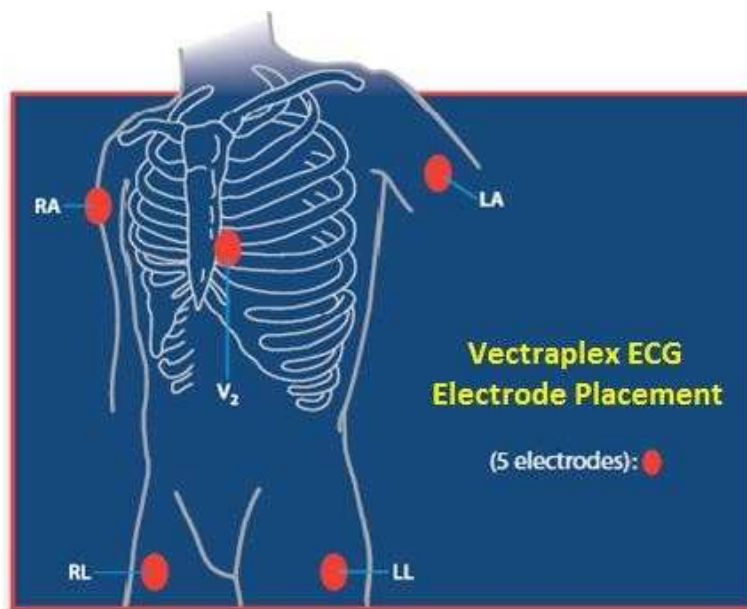

Colocación de 5 electrodos  
(ECG de 15/12/22 canales derivado e índice CEB)

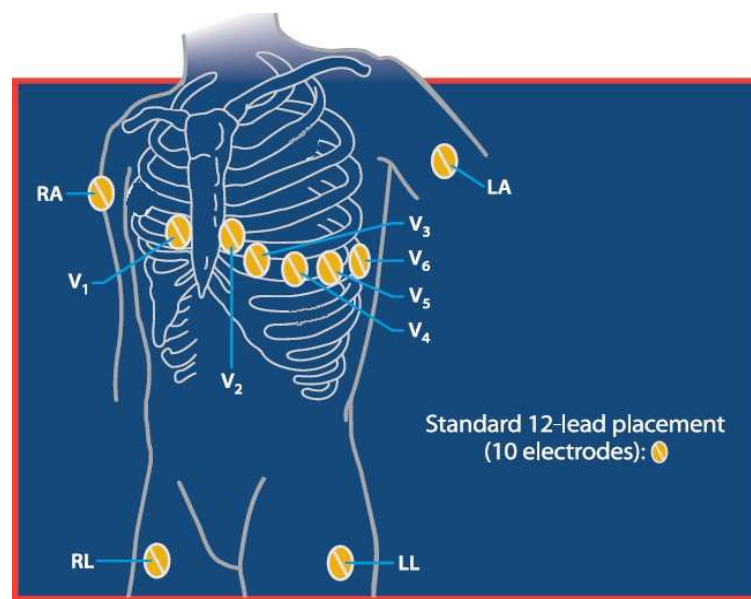

Colocación de 10 electrodos

**\* NO COLOQUE ELECTRODOS DE EXTREMIDADES EN EL TORSO \***

\* V<sub>2</sub> = cuarto espacio intercostal - izquierda del esternón

RA / LA: se puede colocar en cualquier lugar por encima de las muñecas en los antebrazos hasta el deltoides anterior

LL / RL: se puede colocar en cualquier lugar por encima del tobillo hasta la parte superior del muslo

## Consejos rápidos para un trazado claro del ECG

- Use electrodos de gel húmedo no caducados
- Limpie la piel con almohadillas de alcohol
- Afeite el vello en el sitio del electrodo
- Frote el sitio del electrodo con una gasa